



### Step 1

안전을 위해 항상 보호 장갑 및 마스크를 착용하고 감염 위험을 최소화하십시오.

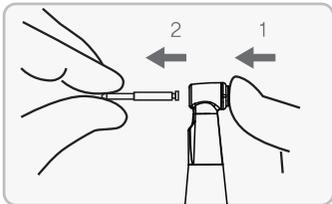


### Step 2

BUR를 분리 시켜줍니다.

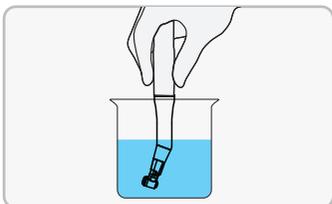


### Step 3

증류수나 알콜에 핸드피스를 거꾸로 넣어 약 30초간 높은 rpm으로 공회전 시켜줍니다.

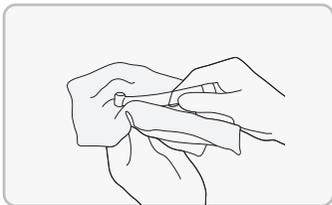


### Step 4

물 또는 알콜을 적신 천을 사용하여 핸드피스의 외부를 깨끗하게 닦아줍니다.

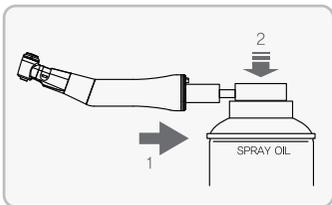

### Step 5

스프레이 오일 또는 주유장비를 이용하여 3초 이상 오일링 해줍니다.

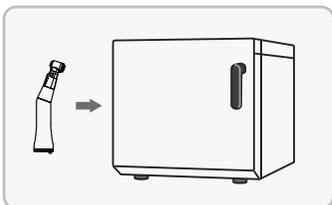

### Step 6

오토클레이브에 핸드피스를 넣어 멸균 후 사용합니다

Cycle type	Temperature	Exposure time	Drying time
Pre-Vacuum	135°C (275°F)	18 minutes	30 minutes
Gravity displacement	135°C (275°F)	10 minutes	30 minutes